



B/S[®]
SPANGE
Quick

Anleitung

Schritt für Schritt erklärt

Anleitung - B/S Spange Quick

Schritt für Schritt erklärt

Vor der Behandlung zu beachten

Die B/S Spange darf nicht auf kranke Nägel appliziert werden z.B. Pilzerkrankung, Schuppenflechte, Onycholyse etc.

- keine Fußbäder
- keine Desinfektionsmittel
- kein ölen oder cremen
- kein Nagellackentferner
- Nassfräsetechnik ausschalten!

Nach der Behandlung zu beachten

- Aufgeklebte B/S Spange mit Kleber versiegeln. Diese Versiegelung löst sich nicht durch Aceton oder Nagellackentferner.
- Erst nach der Versiegelung können Abschlussbehandlungen durchgeführt werden, wie z.B. cremen, ölen, lackieren, tamponieren oder Wundversorgung.

Videoanleitung

Falls Sie sich lieber ein Video anschauen möchten, können Sie gerne unsere Website besuchen:

www.bs-spange.de/schulungsvideos



Wie wird ein QR-Code gescannt?

Öffnen Sie die Kamera oder eine QR-Code Scanner App auf dem Smartphone. Halten Sie die Kamera über den QR-Code. Es erscheint ein Link, diesen tippen Sie bitte an und nun können Sie das passende Schulungsvideo auswählen.

Wichtige Hinweise neben der Anwendung

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
- Die Chargennummer des Klebers befindet sich auf dem Deckel und ist das Verfallsdatum. Bsp.: Chrg.-Nr. 1021, Verfallsdatum: Oktober 2021.
- Den Pinsel des Klebers nicht am Flaschenhalsrand abstreifen.
Es kommt sonst zu Verklebungen!
Somit haben Sie auch die perfekte Menge an Kleber.
- Kleber und Aktivator dürfen nicht in Kontakt kommen, die Folgen sind:

Die Haltbarkeit des Klebers wird verkürzt

Der Kleber zieht Fäden

Der Flascheninhalt härtet aus

- Kleber einfrieren! Die Haltbarkeit des Klebers verlängert sich um die Zeit in der dieser sich im Gefrierfach befindet, aber **ACHTUNG!** Der Kleber muss bei Zimmertemp. angewendet werden, ca. 21–24 Grad.
- Aktivator testen: Mit dem Stift über ein Blatt Papier streichen, wenn dieser Flüssigkeit abgibt, funktioniert er noch.
Wichtig: Aktivator immer fest verschließen!
- Ist der Zug der Spange nach der Verklebung zu stark, einfach die Spange gefühlvoll an den beiden Enden dünner fräsen. Wenn notwendig schleifen Sie die gesamte Spange dünner.





1. Nagel vorbereiten

Wichtig für die feste und sichere Anbringung der B/S Spange ist das Abschleifen und Anrauen der Nagelplatte. Kräftige Nägel sind dünner zu schleifen.

Die Nageloberfläche wird mit einem Diamant- oder Korundfräser aufgeraut.



2. Spangengröße ermitteln

Die B/S Spange soll die sichtbare Nagelplatte überspannen. Auf dem Träger befindet sich seitlich eine Messschablone. Legen Sie diese quer über den Nagel. Sie haben die korrekte Größe, wenn sie seitlich mit dem Nagelrand abschließt.

Die Platzierung

Die optimale Wirkung der B/S Spange erreichen Sie, wenn die B/S Spange 1 - 2 mm rückwärtig des schmerzverursachenden Bereiches verklebt wird.



3. Die Trägerfolie zuschneiden

Schneiden Sie mit der Schere eine B/S Spange in der zuvor ermittelten Größe komplett ab. Sie haben nun ein kurzes und ein langes Griffband.

Berühren Sie nicht die B/S Spange und reinigen sie diese auch nicht. Bewahren Sie den Quick-Träger mit den B/S Spangen immer in der Schutzfolie und der Tüte auf.



4. B/S Spange vorbereiten

Schleifen Sie mit einem Diamant- oder Korundfräser die Enden (ca. 2–4 mm) der B/S Spange **auf der rauhen Seite etwas dünner**. Dadurch lassen sich die Enden leichter an den Nagel andrücken und stehen nicht ab.



5. Das Entfetten

Nach Bestimmen der B/S Spangengröße entfetten Sie die komplette Nageloberfläche mit **einem Tropfen B/S Reiniger** auf einem Tupfer.

Danach trocknen Sie den Nagel mit dem trockenen Teil des Tupfers ab.



6. B/S Aktivator auftragen

Streichen Sie nun den Nagel mit dem B/S Aktivator-Stift ein.

Der Aktivator ist zum sicheren und schnellen Abbinden des Klebers notwendig.



7. B/S Kleber auftragen

Nehmen Sie die ausgewählte B/S Spange wie abgebildet und tragen Sie einen vollen Tropfen B/S Kleber auf die B/S Spange auf. Nicht den Pinsel auf die B/S Spange drücken. Möglichst nur mit der Flüssigkeit die Spange berühren. Vermeiden Sie Hautkontakt und decken Sie Entzündungen und Wunden mit einer Salbe ab. Klebstoff darf nicht auf Wunden gelangen.



7.1. Die richtige Fixierung

Ergreifen Sie das lange Ende des Spangenträgers. Legen Sie nun den kurzen Teil mit der B/S Spange 1 - 2 Millimeter rückwärtig des Schmerzpunktes am seitlichen Nagelrand an und drücken diese Seite für ca. 5 Sekunden mit dem Finger auf dem Nagel fest.

Unser Tipp:

Bewahren Sie Ruhe!

Während des Andrückens möglichst nicht verrutschen und freihändiges Arbeiten unterlassen. Stützen Sie sich am Fuß des Patienten ab.




7.2. Das korrekte Ankleben

Ohne das kurze Griffband vom Nagel abzuheben, streichen Sie mit dem rechten Zeigefinger über den Träger mit der B/S Spange bis zum gegenüberliegenden Nagelfalz und drücken Sie diesen für ca. 10 Sekunden an. Nicht am langen Griffband ziehen!

Das Entfernen des B/S Trägers Ziehen Sie vorsichtig die Trägerfolie mit der Verdickung ab. Trägerreste auf Nagel und Spange sollten entfernt werden. Zur Weiterverarbeitung muss der B/S Kleber abgetrocknet sein.

Mehr zur Alternativmethode finden Sie auf unserer Webseite www.bs-spange.de.

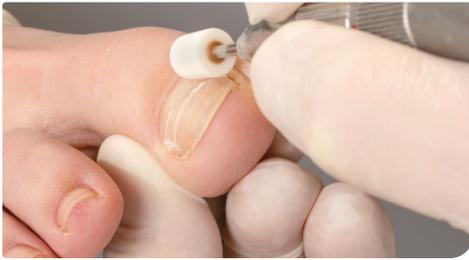

8. Individuell Zugkräfte anpassen

Verspürt Ihr Patient nach der Verklebung der B/S Spange einen Zugschmerz oder ein unangenehmes Ziehen so ist die Spannung zu stark.

Die angeklebte B/S Spange müssen Sie in diesem Fall, in den Endbereichen, oder wenn dies nicht ausreicht, insgesamt gefühlvoll dünner schleifen.

Ihr Vorteil:

Die Korrektur der B/S Spange erfolgt auf dem Nagel!

Abstehende Spangenenenden können Sie bei weniger als 1 mm wegschleifen.



9. Nagel mit B/S Reiniger säubern

Vor der Versiegelung bitte den Aktivator entfernen, **ein Tropfen B/S Reiniger** auf einen Tupfer geben und über die Nagelplatte wischen. Somit wird der zuvor aufgetragene Aktivator entfernt.

Achtung:

Der Aktivator darf nicht mit dem Kleber in Verbindung kommen, da der Kleber sonst austrocknet.



10. Die Versiegelung

Um eine besonders feste und wasserresistente Verankerung zu erzielen, versiegeln Sie mit dem B/S Kleber den Nagel mit der bereits aufgeklebten B/S Spange.

Diese Versiegelung löst sich nicht mit Aceton oder Nagellackentferner!

Verteilen Sie den B/S Kleber wie einen Lack über die gesamte Nageloberfläche.



11. Die Nachversorgung

Nach dem Abtrocknen der Versiegelung (ca. 5 Minuten) kann die übliche Nagelversorgung durchgeführt werden:

- Tamponieren des Nagelfalzes
- Anlegen von Salbenverbänden
- Lackieren der Nägel
- Fußbäder
- Cremen und ölen



12. Das Ablösen der B/S Spange

Benutzen Sie am Besten eine gerade Nagelzange zum Ablösen der B/S Spange. Setzen Sie die Zange dazu an einem Ende „zwischen Spange und Nagel“ an. So können Sie die Verklebung einfach sprengen und die B/S Spange vorsichtig vom Nagel lösen (siehe Bilder oben).



Korrekturoptimierung

Die beste Korrektur eines eingewachsenen Nagels erreicht man, wenn **alle 4 Wochen eine neue B/S Spange** appliziert wird.

Sie kann aber auch länger auf dem Nagel belassen werden, bis sie von selbst abgeht. Jedoch hat sie **nach 4 Wochen nur noch geringe, bis keine Hebekraft** mehr.

Falls notwendig und zwischen Nagelwurzel und erster B/S Spange genug Platz ist, kann nach einem Monat oder später eine zweite B/S Spange in den Zwischenraum geklebt werden.

Achtung: Beachten Sie die Hebekräfte bei zwei B/S Spangen!



Absolut Original,

seit über 35 Jahren.

 berndstolzgmbh

 bsspange

Bernd Stolz GmbH

Fuggerstraße 36 a
D-92224 Amberg

+49 96 21 / 22 1 88
info@bs-spange.de

www.bs-spange.de
www.shop.bs-spange.de